


Bestandteile Intraoral Registration Set


Basis-Set

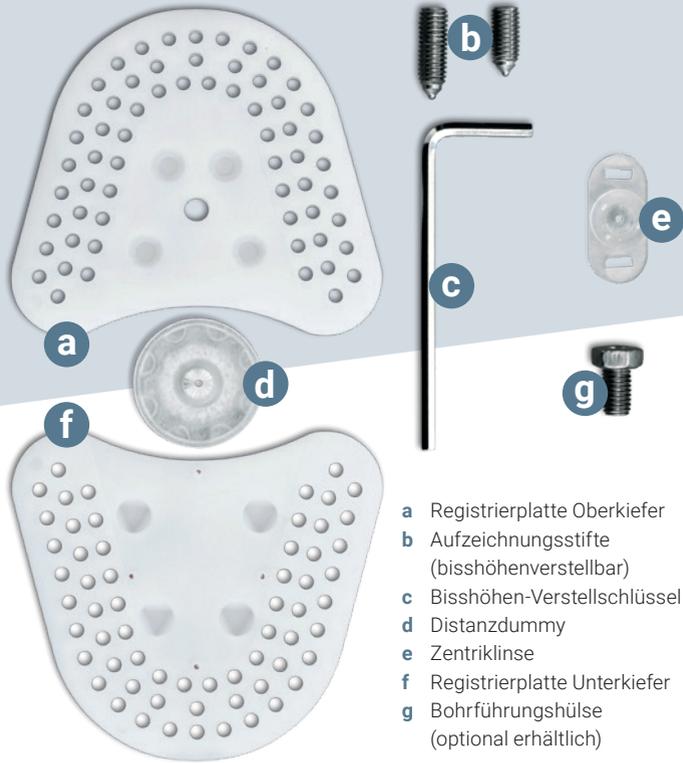

- a Registrierplatte Oberkiefer
- b Aufzeichnungsstifte (bisshöhenverstellbar)
- c Bisshöhen-Verstellschlüssel
- d Distanzdummy
- e Zentriklinse
- f Registrierplatte Unterkiefer
- g Bohrführungshülse (optional erhältlich)

Bestandteile Bissgabelträger-Set

vereinfacht das Anbringen der Bissgabel eines Gesichtsbogens

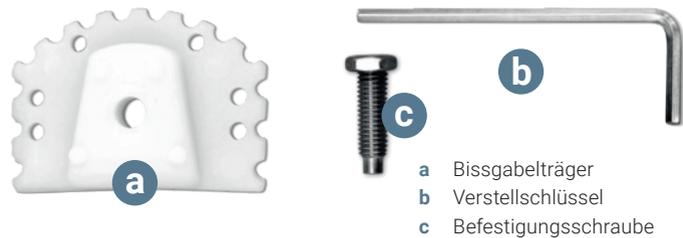

- a Bissgabelträger
- b Verstellschlüssel
- c Befestigungsschraube


Oberkieferplatte klein

für die partielle Prothetik



ARTIKELÜBERSICHT

| Beschreibung | Art.-Nr. |
|---|----------|
| GQ IRS Basis-Set, einzeln | 30305017 |
| GQ IRS Basis-Set, 5 Stück | 30305010 |
| GQ IRS Bissgabelträger-Set, 5 Stück | 30305013 |
| GQ IRS Aufzeichnungsstifte kurz, 10 Stück | 30305011 |
| GQ IRS Aufzeichnungsstifte lang, 10 Stück | 30305012 |
| GQ IRS Bisshöhen-Verstellschlüssel, 5 Stück | 30305014 |
| GQ IRS Bohrführungshülse, 5 Stück | 30305015 |
| GQ IRS Distanzdummy, 10 Stück | 30305016 |
| GQ IRS Registrierplatten OK/UK, je 10 Stück | 30305018 |
| GQ IRS Registrierplatte OK klein, 10 Stück. | 30305019 |
| GQ IRS Zentriklinse, 10 Stück | 30305020 |

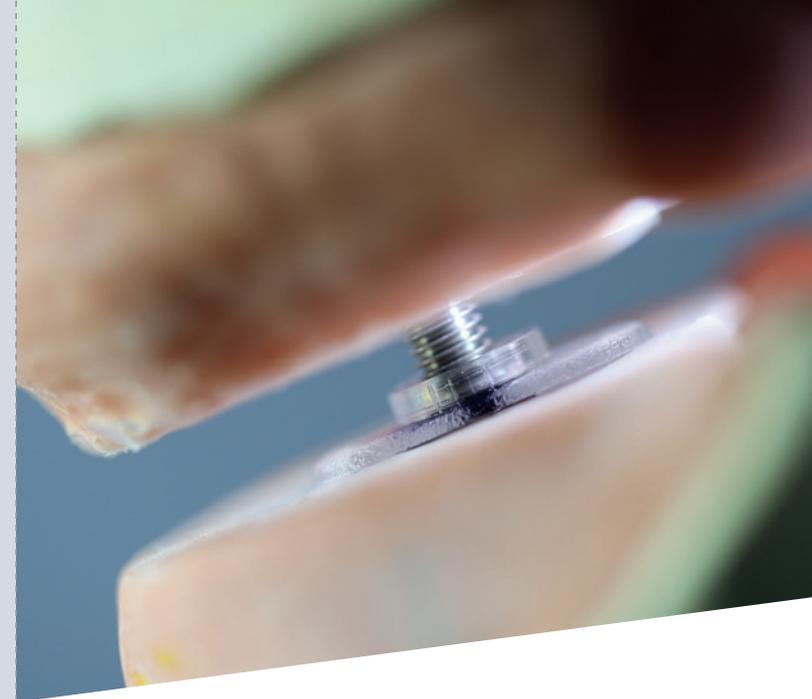

GQ INTRAORAL REGISTRATION SET

STÜTZSTIFT-REGISTRIERUNG LEICHT UND EFFEKTIV

von Spezialisten für Anwender

Gold Quadrat GmbH

Büttnerstraße 13
30165 Hannover

T +49 (0) 511 449897-0
F +49 (0) 511 449897-44

info@goldquadrat.de

www.goldquadrat.de



GQ2258/06.24



MIT UNS HABEN SIE GUT LACHEN!
GOLDQUADRAT



Fertig zur Stützstiftregistrierung
in der Zahnarztpraxis



Vorbereitung zur
Bisshöhenverstellung

Das Intraoral Registration Set ist ein effektives Hilfsmittel für die mechanische Stützstiftregistrierung. Diese obliegt primär dem Zahnarzt, aber die Qualität des Stützstiftregistrats hängt von der präzisen Passung der Schablonen bzw. der Registrierbehelfe ab. Mit der einfachen patientengerechten Individualisierung durch den Zahntechniker wird dem Zahnarzt daher die Registrierung erheblich erleichtert.

In der Praxisanwendung ist die aufwendige Stützstiftmethode zur Kieferrelationsbestimmung häufig mit Problemen verbunden. Diesen Umständen haben sich u. a. die Funktionsspezialisten Prof. Dr. Peter Pospiech und ZTM Alfred Schiller angenommen und auf den Prinzipien der Stützstiftregistrierung nach Prof. Gerber das Intraoral Registration Set entwickelt. Dessen Registrierbehelfe lassen sich einfach einbauen, ermöglichen eine arbiträre Übertragung und erleichtern damit die Anwendung. Die Kieferrelationsbestimmung mit dem durchdachten Intraoral Registration Set ist somit schnell, simpel und sicher. Die Methode wird durch die Möglichkeit die Bisshöhe einzustellen zusätzlich vereinfacht.



Das Set ist kompatibel mit allen gängigen Gesichtsbögen und Artikulatorsystemen. Da es effizient und kostengünstig ist, lässt es sich wirtschaftlich einsetzen und ist über die BEL II abrechenbar*.

Vorteile bei der Registrierung mit dem IRS

- Der Bissgabelträger zum schädelbezogenen Einsetzen in den Artikulator ist kompatibel für alle gängigen Gesichtsbögen.
- Lange Gewindegänge für den Stift sichern das ungewollte Verstellen der Bisshöhe.
- Die stabilen Registrierplatten biegen sich beim Registrieren nicht durch.
- Die Lochung in den Registrierplatten ermöglichen exaktes Anzeichnen, leichtes Ausschneiden der Plattengröße, eine hervorragende Verbindung zum Löffelmaterial und verhindern ein Schmieren beim Ausfräsen.
- Der Stift des Distanzdummys wird im OK so positioniert, dass er im Kauzentrum des UK auftrifft.
- Durch den Rotationsschutz lässt sich das Verschlussmaterial exakt auf den Schablonen reponieren.

* Stand Januar 2021

