

Für den klaren Durchblick



EXACLEAR von GC

Klares Vinyl-Polysiloxan-Material
Ihr Partner für die
Injektionstechnik in
Kombination mit GRADIA® PLUS
Glasklares Arbeiten für:

- Hervorragende Detailkontrolle
- Einfaches Handling
- Schnelles Abbinden

GC

EXACLEAR und GRADIA PLUS

von GC

EXACLEAR eignet sich optimal für die Fertigung temporärer Kronen oder Veneers. Im Vergleich zu Acryl-Material ist GC GRADIA PLUS Light Body einfacher zu handhaben und technisch weniger anspruchsvoll. Das Material wird einfach in die EXACLEAR-Abformung injiziert!

Die hohe Transparenz gewährleistet optimale Sichtkontrolle und die Lichthärtung durch die Abformung hindurch sorgt für eine effiziente Polymerisation. Das Material ist fest, aber flexibel, lässt sich leicht entfernen und neu positionieren, ohne zu reißen.

Für das Individualisieren mit Heavy Body Enamel HB-E kann Platz gelassen werden. Das abschließende Bemalen und Glasieren mit Lustre Paint ist der perfekte Abschluss!



EXACLEAR wird in eine Tiefziehschablone eingebracht und über dem Wax-up positioniert.



Vorbereitetes Modell: Präparationen wurden mit einem Silikon-Separator, der Rest mit GC GRADIA PLUS Separator beschichtet.



Injizieren von Light Body.



Das Composite wird durch das besonders klare EXACLEAR hindurch lichtgehärtet.



Nach Entfernung des Silikons und Reinigung der Zwischenräume.



Temporäre Restauration nach der Fertigstellung mit Lustre Paint.

Ihr Partner für anspruchsvolle klinische Situationen



Temporäre Implantatabutments mit GRADIA PLUS opakiert und mit GC Stick glasfaserverstärkt.



Injiziertes und lichtgehärtetes Light Body Material.



Nach Reinigung und Cut-back der Restaurationen.



Oberflächenmodifikation mit Lustre Paint, beschichtet mit Heavy Body Enamel HB-E.



Fertigstellung mit Lustre Paint CLF.



Klinische Fälle: Stephen Lusty, Großbritannien
EXACLEAR, GC Stick und GRADIA PLUS sind Marken von GC.

GC EUROPE N.V. - Head Office
Researchpark, Haasrode-Leuven 1240, Interleuvenlaan 33, B-3001 Leuven
Tel. +32.16.74.10.00, Fax. +32.16.40.48.32, info.gce@gc.dental, <http://www.gceurope.com>

GC GERMANY GmbH
Seifgrundstraße 2, D-61348 Bad Homburg, Tel. +49.61.72.99.59.60, Fax. +49.61.72.99.59.66.6
info.germany@gc.dental, <http://germany.gceurope.com>

GC AUSTRIA GmbH
Tallak 124, A-8103 Gratwein-Strassengel, Tel. +43.3124.54020, Fax. +43.3124.54020.40
info.austria@gc.dental, <http://austria.gceurope.com>

GC AUSTRIA GmbH - Swiss Office
Zürichstrasse 31, CH-6004 Luzern, Tel. +41.41.520.01.78, Fax. +41.41.520.01.77
info.switzerland@gc.dental, <http://switzerland.gceurope.com>